

# CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test

siemens-healthineers.com



## Probenentnahme der Nasenhöhle



1  
Nutzen Sie das sterile Abstrichstäbchen und führen Sie es vorsichtig in ein Nasenloch ein.



2  
Das Abstrichstäbchen sollte 2-4 cm eingeführt werden, bis sie auf Widerstand stoßen. Drehen Sie das Abstrichstäbchen fünf mal in Ihrem Nasenflügel.



3  
Nutzen Sie dasselbe Abstrichstäbchen und wiederholen Sie diesen Prozess in Ihrem anderen Nasenflügel. Drehen Sie das Abstrichstäbchen wieder fünf mal in Ihrem Nasenflügel.



4  
Ziehen Sie das Abstrichstäbchen aus Ihrer Nasenhöhle und folgen Sie Ihren örtlichen Anweisungen für die Probenverarbeitung.

Falls Sie die Probe auswerten, lesen Sie bitte die nächste Seite →

Benutzen Sie diesen Test nicht nach dem Ablaufdatum.  
Lagern Sie die Probe und das Testequipment bei Raumtemperatur (15-30°C und falls nötig, nutzen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung).

SIEMENS  
Healthineers